

Sistema de cuidado para accesorios dentales removibles

Recomendado para todos los accesorios dentales removibles, incluyendo partes dentales total o parcialmente metálicas, retenedores de ortodoncia, broches metálicos y revestimientos suaves.

El kit incluye:

Gel antibacterial (botella de 4 oz.), líquido limpiador (botella de 8 oz.) y recipiente de remojo.



Gel antibacterial

Al aplicar el gel antibacterial con xilitol a tus accesorios dentales removibles ayudarás a mantener un aliento fresco y a eliminar bacterias que pueden causar caries. Para mejores resultados, aplíquelos después de cada comida.

Líquido limpiador

El limpiador antibacterial ayuda a remover restos de calcio, prevenir el regreso de manchas y la acumulación de placa. Seguro y efectivo, este líquido no es corrosivo para piezas dentales total o parcialmente metálicas, retenedores de ortodoncia, broches metálicos y revestimientos suaves.



Recipiente de remojo

Un conveniente recipiente de dos partes con una cest para escurrir que permite mezclar líquidos, escurrir tu accesorio dental removible y guardar mezclas para usar más adelante.

Revisa más dentales en denmat.com



LLAME AL: 1-855-876-4531
brident.com

brident.
DENTAL & ORTHODONTICS

Direcciones para el uso del sistema de cuidado

Gel antibacterial instrucciones de aplicación

Para dentaduras: Frote suavemente para esparcir una delgada capa de gel directamente en el tejido suave del accesorio dental antes de ponerse la dentadura.

Para accesorios dentales removibles como retenedores o protectores bucales: Aplique una pequeña gota de gel en los compartimientos dentales individuales de su accesorio dental removible o en la parte inferior del retenedor antes de ponerlo en la boca. Para mejores resultado aplíquelo después de cada comida.



Apply a small bead of gel onto your appliance.


Cleaning Solution Instructions



Agite suavemente por 15 segundos antes de usar.



Enjuague y cepille el accesorio para remover cualquier partícula suelta.

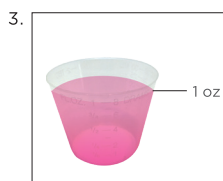

Usando la taza medidora adjunta, combine 1 oz. de Líquido Limpiador con 4 oz. de agua y mézclelos en el Recipiente de Remojo.



Remoje al menos durante 4 minutos.



Enjuague minuciosamente el accesorio con agua limpia antes de ponerlo en la boca.

Note: Nota: Para el premer uso, remójele durante la noche. Reutilice la mezcla hasta que la capacidad de limpieza disminuya. El líquido mezclado puede ser efectivo y reutilizable por hasta 12 limpiezas. Esta botella de 8 oz. pude ser usada por hasta 96 limpiezas. La recarga de 16 oz. se vende por separado.

Revisa más dentales en denmat.com

Instrucciones entregadas para la comodidad del paciente. Para m s detalles favor consultar las instrucciones del fabricante incluidas en cada envase. Soumava Sen DDS, P.C. y Brident Dental Associates, P.C. son propiedad y est n operados de forma independiente por los dentistas matriculados, Soumava Sen, DDS, Yein Kim, DMD y Sylvia Lin, DDS, quienes hacen negocios en nombre de Brident. Los consultorios de Brident reciben servicios de apoyo administrativo y empresarial de Brident Dental Services, LLC ("BDS"). BDS no es propietario de los consultorios dentales ni los opera, como tampoco emplea ni supervisa de ninguna manera a los dentistas que brindan atenci n dental.

