

Ayuda a controlar las bacterias que causan las enfermedades de las encías

PERIO


Comienza con un tratamiento en el consultorio y la receta de GüMX Defender Plus+®

GüMX Defender Plus+®, el cual se receta en conjunto con un tratamiento en el consultorio, es un sistema de tratamiento a domicilio para ayudar a los pacientes a controlar las bacterias que causan las enfermedades de las encías. Las bandejas personalizadas se rellenan con una pequeña cantidad de gel GüMX Defender Plus+® cada día para proporcionar la medicación muy por debajo de la línea de las encías hasta las cavidades de las encías infectadas donde se esconden y multiplican las bacterias. Solo toma de 10 a 20 minutos al día.

GüMX Defender Plus+® ayuda a tratar una amplia variedad de afecciones de salud bucal:

- Encías inflamadas y sangrantes
- Infecciones que pueden posiblemente producir la pérdida de dientes y huesos
- Trata todo el arco dentario

Además: Las bandejas personalizadas también pueden utilizarse para aplicar fluoruros y otros medicamentos.

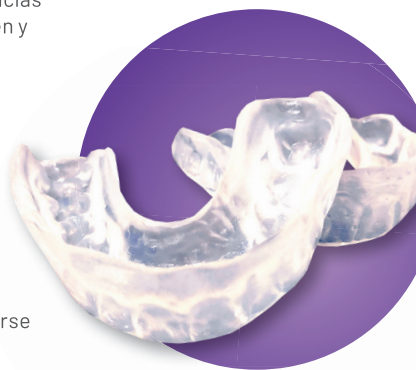

Su kit de GüMX Defender Plus+® incluye lo siguiente:

- **Gel GüMX Defender Plus+®:** contiene 1.7% de peróxido de hidrógeno que disminuye la placa (concentración de bacterias) y el desarrollo de enfermedades de las encías
- **Gel de fluoruro Pro-DenRx:** un gel neutro con 1.1% de fluoruro de sodio que ayuda a prevenir las caries y la placa
- **Aprieta pomo:** libera el medicamento para evitar desperdicios



LLAME AL: 1-855-876-4531
brident.com

FLY-GURX-PROD-SPA-B0

Instrucciones de uso diario y semanal

Uso diario del gel GüMX Defender Plus⁺:

- Después de cepillarse los dientes y usar hilo dental, vierta una pequeña cantidad del gel GüMX Defender Plus⁺ a lo largo de la parte interior de cada bandeja
- Colóquese firmemente las bandejas en los dientes y escupa el exceso de gel
- Use las bandejas de 10 a 20 minutos o como se lo haya indicado su dentista. Una vez que las bandejas se hayan usado durante el tiempo asignado, retírelas y enjuáguese la boca o cepílese los dientes para retirar el gel restante
- Enjuague las bandejas con agua fría y colóquelas en un estuche para bandejas para que se sequen
- Espere al menos una hora antes de utilizar cualquier otro tratamiento bucal



**Encías enfermas
e infectadas**



**Encías y dientes
saludables**

Uso semanal del gel de fluoruro Pro-DenRx[®]

(usar una vez a la semana en lugar del gel GüMX Defender Plus⁺):



- Después de cepillarse los dientes y usar hilo dental, vierta una pequeña cantidad del gel Pro-DenRx Fluoride a lo largo de la parte interior de la bandeja
- Colóquese firmemente las bandejas en los dientes y escupa el exceso de gel
- Use las bandejas durante 20 minutos o como se lo haya indicado su dentista
- Una vez que haya pasado el tiempo asignado, retire las bandejas y enjuáguese la boca o cepílese los dientes para retirar el gel restante
- Enjuague las bandejas con agua fría y colóquelas en un estuche para bandejas para que se sequen
- Espere al menos una hora antes de utilizar cualquier otro tratamiento bucal

Precaución: Utilice únicamente agua fría para enjuagar las bandejas, ya que el agua caliente puede dañarlas.

Para conocer más detalles, consulte las instrucciones sobre el sistema del kit para el paciente que vienen incluidas en el envase del gel GüMX Defender Plus⁺. Soumava Sen DDS, P.C. y Brident Dental Associates, P.C. son propiedad y están operados de forma independiente por los dentistas matriculados, Soumava Sen, DDS, Yein Kim, DMD y Sylvia Lin, DDS, quienes hacen negocios en nombre de Brident. Los consultorios de Brident reciben servicios de apoyo administrativo y empresarial de Brident Dental Services, LLC ("BDS"). BDS no es propietario de los consultorios dentales ni los opera, como tampoco emplea ni supervisa de ninguna manera a los dentistas que brindan atención dental.