

Después De Los Frenos: Kit Para Cuidado y Blanqueo Del Retenedor De Ortodoncia

Para una Fresca y Brillante Sonrisa

DEBAND

Sistema Para El Cuidado Del Retenedor De Ortodoncia

El kit incluye:

- **Gel Antibacterial (botella de 4 oz.)**
Al aplicar el Gel Antibacterial con Xylitol a tus Accesorios Dentales Removibles ayudarás a mantener un aliento fresco y a eliminar bacterias que pueden causar caries. Para mejores resultados, aplíquelos después de cada comida
- **Líquido Limpiador (botella de 8 oz.)**
El Limpiador antibacterial ayuda a remover restos de calcio, prevenir el regreso de manchas y la acumulación de placa. Seguro y efectivo, este líquido no es corrosivo para piezas dentales total o parcialmente metálicas, retenedores de ortodoncia, broches metálicos y revestimientos suaves
- **Recipiente De Remojo**
Un conveniente recipiente de dos partes con una cesta para escurrir que permite mezclar líquidos, escurrir tu Accesorio Dental Removible y guardar mezclas para usar más adelante



[Revisa más detalles en denmat.com]

Blanqueamiento Dental Profesional OPALESCENCE GO® PAQUETE DE 10

- Trabajando de adentro hacia fuera, los ingredientes activos penetran tus dientes para romper las moléculas coloradas, eliminando manchas y blanqueando tu sonrisa
- Contiene nitrato de potasio y fluoruro (han demostrado fortalecer el esmalte, disminuir la sensibilidad y ayudar a prevenir las caries)



La Caja Incluye: 10 juegos de bandejas de aplicación (dientes superiores e inferiores) para un tratamiento blanqueador de 10 días

[Más detalles en opalescence.com]

LLAME AL: 1-855-876-4531
brident.com

FLY-ORTH-DBK-SPA-BD

brident.
DENTAL & ORTHODONTICS

Direcciones De Uso Para El Sistema De Cuidado y Blanquedor



CARE SYSTEM Instrucciones de aplicación del Gel Antibacterial

Para Accesorios Dentales Removibles, incluyendo retenedores de ortodoncia o protectores bucales: Aplique una pequeña gota de gel en los compartimientos dentales individuales de su Accesorio Dental Removible o en la parte inferior del retenedor antes de ponerlo en la boca. Para mejores resultados aplíquelo después de cada comida.



Aplique una gota de gel en su accesorio.

[Revise más detalles en denmat.com]

CARE SYSTEM Instrucciones Para El Líquido Limpiador



Agite suavemente por 15 segundos antes de usar.



Enjuague y cepille el accesorio para remover cualquier partícula suelta.



Usando la taza medidora adjunta, combine 1 oz. de Líquido Limpiador con 4 oz. de agua y mézclelos en el Recipiente de Remojo.



Remoje al menos durante 4 minutos.



Enjuague minuciosamente el accesorio con agua limpia antes de ponerlo en la boca.

Nota: Para el primer uso, remójelo durante la noche. Reutilice la mezcla hasta que la capacidad de limpieza disminuya. El líquido mezclado puede ser efectivo y reutilizable por hasta 12 limpiezas. Esta botella de 8 oz. puede ser usada por hasta 96 limpiezas. La recarga de 16 oz. se vende por separado.

[Revise más detalles en denmat.com]

Instrucciones entregadas para la comodidad del paciente. Para más detalles favor consultar las instrucciones del fabricante incluidas en cada envase. Soumava Sen DDS, P.C. y Brident Dental Associates, P.C. son propiedad y están operados de forma independiente por los dentistas matriculados, Soumava Sen, DDS, Yein Kim, DMD y Sylvia Lin, DDS, quienes hacen negocios en nombre de Brident. Los consultorios de Brident reciben servicios de apoyo administrativo y empresarial de Brident Dental Services, LLC ("BDS"). BDS no es propietario de los consultorios dentales ni los opera, como tampoco emplea ni supervisa de ninguna manera a los dentistas que brindan atención dental.


brident.
DENTAL & ORTHODONTICS